



## TP 03 *Drain'confort*

### APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE



#### ***SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES***

<b>Poids :</b>	1.9 kg	<b>Puissance :</b>	24 W	<b>Intensité sonore :</b>	44 dB<I>46 dB
<b>Dimensions :</b>	11*28*23 cm	<b>Intensité :</b>	12 V		
<b>Pression :</b>	Réglable : 15-99 mmHg (20 – 132 mB)				

#### ***Mode de régulation de la pression :***

↪ Double Gradient de Pression Automatique (D.G.P.A. – Brevet International)

#### ***Durée du cycle :***

↪ La durée fluctue de 65 à 115 secondes, selon la taille du membre à traiter et le niveau de pression programmée.

#### ***Gonflage des éléments :***

↪ 2 rangées de 3 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément.

#### ***Matériau des éléments :***

Extérieur : Nylon / Intérieur : Polyuréthane  
Fermeture : éléments thermo-soudés

#### ***Raccordement :***

Éléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite d'air  
Pompe / tubes : avec connecteurs différenciés

#### ***Identification des éléments:***

Manchons de 3 chambres (compartiments)  
Bottes de 3 chambres  
Hanchières de 3 chambres


#### ***Confort d'utilisation :***

Grace à sa conception avancée, le TP03 est très silencieux, très simple d'utilisation.

### UN CYCLE DE 7 PHASES

***Les éléments de gonflage du TP03 comportent 3 chambres numérotées de 1 (distal) à 3 (proximal).***

***Il existe un "Gradient de Pression automatique" entre les 3 chambres. La pression sélectionnée par l'opérateur est celle qui sera constatée dans la chambre proximale en fin de cycle.***

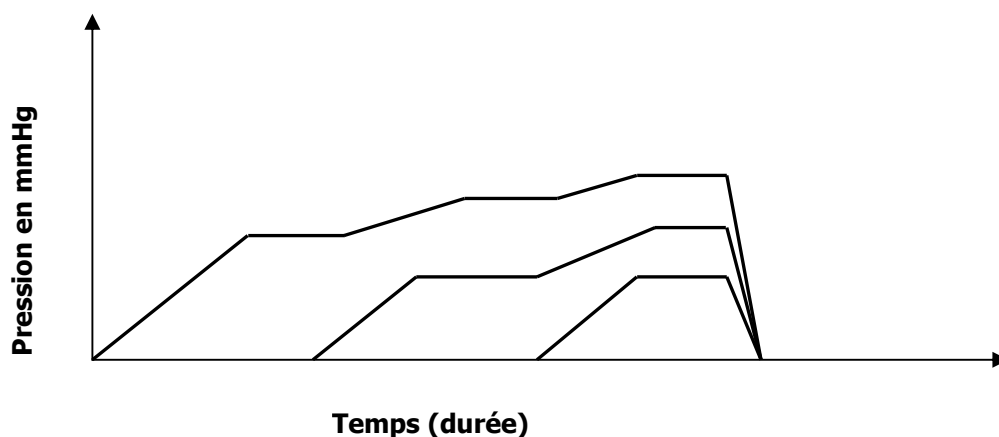

- Phase a** ⇒ Gonflage de la chambre 1  
**Phase b** ⇒ Temps de travail de 4s. La chambre 1 restera gonflée jusqu'en fin de **phase f**  
**Phase c** ⇒ Gonflage de la chambre 2 + supplément de pression dans la chambre 1  
**Phase d** ⇒ Temps de travail de 4s. La chambre 2 restera gonflée jusqu'en fin de **phase f**  
**Phase e** ⇒ Gonflage de la chambre 3 + suppléments de pression dans les chambres 1 et 2  
**Phase f** ⇒ Temps de travail de 3s  
**Phase g** ⇒ Dégonflage des 3 chambres et repos : 12s

## INDICATIONS

- Œdèmes des membres : Lymphoedème - Phléboedème
- Prévention de la thrombose – séquelles de phlébite
- Problèmes circulatoires
- Jambes lourdes
- Récupération post-chirurgical
- Remodelage corporel

## CONTRE INDICATIONS

- Thrombose veineuse en phase aiguë
- Etat inflammatoire ou infectieux du membre à traiter
- Décompensation cardiaque et rénale
- Présence de douleur ou d'insensibilité des membres
- Toute circonstance où l'augmentation des retours veineux et lymphatique est indésirable

## RÉFÉRENCES

TP03	Appareil de drainage veino-lymphatique	
M3PPM	Manchon (petit modèle)	Ø 50 cm * 71 cm
M3PGM	Manchon (grand modèle)	Ø 58 cm * 77 cm
M3PSM	Manchon (sur mesure)	Ø X cm * X cm
B3PPM	Botte (petit modèle)	Ø 70 cm * 85 cm
B3PGM	Botte (grand modèle)	Ø 80 cm * 92 cm
B3PSM	Botte (sur mesure)	Ø X cm * X cm
H3P	Hanchière	Ø 72 cm * 106 cm
H3PSM	Hanchière (sur mesure)	Ø X cm * X cm
GHB	Gaines d'hygiène (lot de 100 u)	



DOCTP03F 2009-03-03