



TV 10

APPAREIL DE DÉPRESO-MASSAGE (Vacuodermie®)



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids :	6.5 kg	Puissance :	65 W	Intensité sonore :	43 dB<I>46 dB
Dimensions :	40*31 *10cm	Intensité / Fréquence :	240 V/50 Hz		
Aspiration :	Réglable: -50 – 900 mB			CEI 601-1# 0124/601-1/1	

Mode de régulation de la pression :

↪ Manuel, selon les besoins de chaque protocole de soin

Durées ajustables :

↪ Durée de 20 à 45 minutes, selon les types de séance et la nature de la peau à traiter.

Modes d'utilisation :

- ↪ Vacuodermie® glissée (VdG)
- ↪ Vacuodermie® stationnaire (VdS)
- ↪ Vacuodermie® drainante (VdD)
- ↪ Vacuodermie® à pression constante (VdPC)

Les effets :

- ↪ Effet drainant (élimination des déchets organiques)
- ↪ Libération assouplissement de la trame conjonctive
- ↪ Effet de tonification (stimulation des des fibres élastiques)
- ↪ Effet antalgique (stimulation des mécanorécepteurs)
- ↪ Effet d'hyper vascularisation (oxygénation et action sur le métabolisme cellulaire)



PRINCIPE ET APPLICATIONS

La Vacuodermie® est un concept innovant de massage permettant de réaliser, à l'aide de différentes têtes d'aspiration et de ventouses transparentes, des traitements allant de la profondeur vers la surface.

Le pli formé par la dépression ou aspiration (modulable en intensité) permet une mobilisation spécifique des plans cutanés sous-jacents.

Les manipulations ainsi réalisées, sans pincement et sous contrôle visuel permanent, permettent l'accès à toute une gamme de traitements, jusqu'à lors impossibles à effectuer manuellement.

La technologie du TV10 permet de moduler l'aspiration en forme et en intensité.

On peut ainsi utiliser :

- une dépression constante
- une dépression alternativement basse ou haute.

Le réglable indépendant des différents paramètres permet une infinité de possibilités.













INDICATIONS

- Rhumatologie
- Traumatologie
- Cicatrices (chirurgie plastique & réparatrice)
- Kinésithérapie du sport (lésions musculaires, ligamentaires, entraînement et récupération)
- Réflexologie
- Insuffisances veineuses & lymphatiques
- Esthétique (corps & visage)

CONTRE INDICATIONS

- Erythème
- Dermatose
- Ecchymose
- Tumeur cutanée
- Maladie infectieuse ou inflammatoire évolutive en période de poussée.

RÉFÉRENCES

TV10	Appareil de dépresso-massage (Vacuodermie [®])	H : 100 mm L : 400 mm P : 310 mm	
VM01	Petite/rigide Cicatrices	Ø 6 mm (PVC)	
VM02	Petite / souple Cicatrices et rides	Ø 10 mm (PVC)	
VM03	Petite / rigide Cicatrices et rides	Ø 12 mm (PPMA)	
VM04	Cicatrices Massage réflexe	Ø 17 mm (PPMA)	
VM05	Drainage Massage décontracturant ou relaxant Médecine du sport	Ø 35 mm (PET)	
VM06	Taille medium Médecine du sport Rhumatologie	Ø 60 mm (PET)	
VM07	Grande taille Rhumatologie	Ø 90 mm (PET)	
VE01	Equipée d'un manche Esthétique	Ø 65 mm L: 78 mm (PET)	
VE03	Equipée d'un manche Esthétique	L: 90 mm l: 50 mm (PET)	
VE04	Equipée d'un manche et d'un double rouleau Esthétique	L: 90mm l: 80 mm (PET)	
VM10	Tube d'aspiration «Y» pour multi-applications	L: 2500 mm (PVC)	

DOCTV10F 2009-03-03